

App para el “Control de la epilepsia idiopática”



Ayuda a tus pacientes a mantener una buena calidad de vida



Pexion[®]

Por todas las razones.

Guía de uso de la App:

“Control de la epilepsia idiopática”

La nueva App para controlar la EPILEPSIA IDIOPÁTICA de tus pacientes.


Un adecuado control en perros epilépticos puede ayudar a mantener una buena calidad de vida.

La epilepsia idiopática es una enfermedad neurológica frecuente en la especie canina, y en muchos casos su control representa un reto tanto para el veterinario como para el propietario.

Esta App es una herramienta de apoyo para propietarios y veterinarios que permite mantener un adecuado seguimiento de la evolución de la enfermedad y así actuar adecuadamente ayudando a los perros a vivir plenamente y felices.

Esta guía te ayudará a conocer la App y las ventajas que obtendrá tu cliente, tu paciente y tú haciendo uso de ella.

Antes de empezar, busca desde tu dispositivo móvil o tablet la aplicación “Control de la epilepsia idiopática” en *App Store* o en *Google Play* y descárgatela.

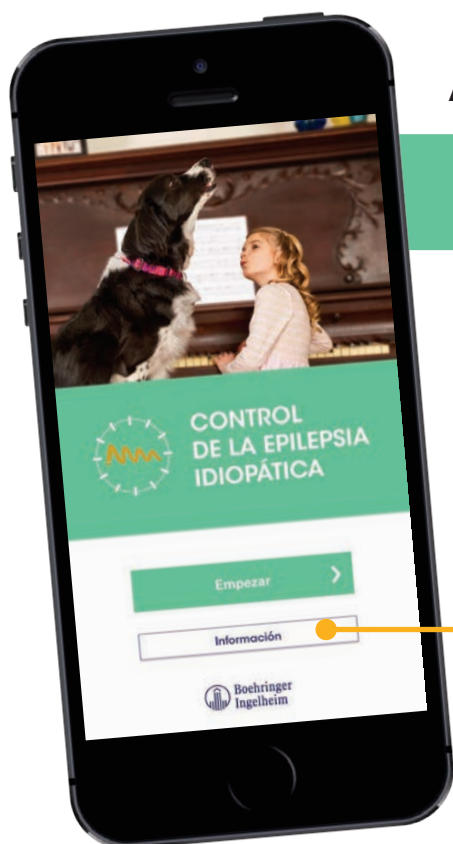

Antes de empezar a utilizar la App:

Información de interés para el propietario sobre la epilepsia idiopática canina.

Al iniciar la App aparecerá la opción de participar en un estudio. El objetivo de este estudio es disponer de datos relativos a la raza y edad de inicio de los ataques, con la finalidad de continuar desarrollando herramientas para el mejor manejo de la enfermedad.





Las principales funciones de la App se dividen en las siguientes pestañas:




Funcionamiento de la App:

1 Añadir una mascota

1. Hacer clic en *Añadir mascota*.
2. Añadir nombre de la mascota, raza, edad actual y edad en la que se iniciaron los ataques.
3. Guardar la ficha.

NOTA: Se puede añadir tantas mascotas como sea necesario.

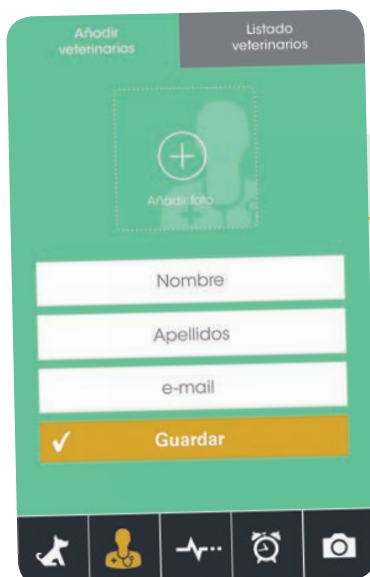


2 Añadir un veterinario

1. Hacer clic en *Añadir veterinario*.
2. Añadir nombre del veterinario y correo electrónico.
3. Guardar la ficha.

NOTA: Se puede añadir tantos veterinarios como desee.

Si no quieres recibir mensajes con la información del paciente, no es necesario proporcionar tu mail al propietario.

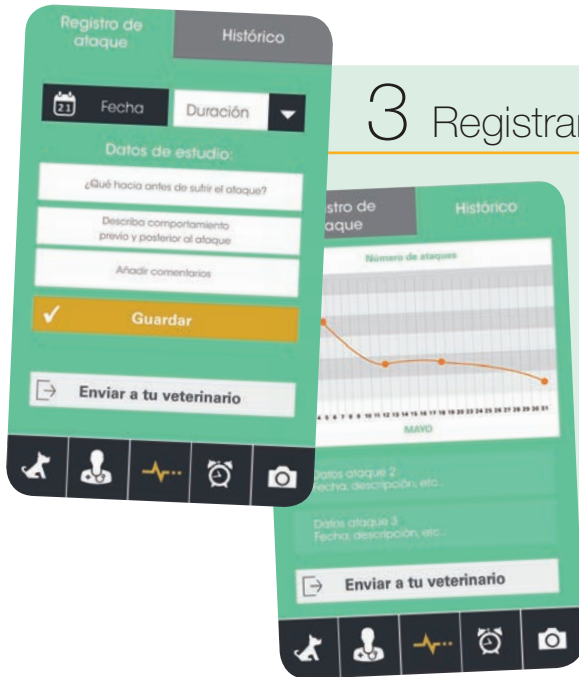


3 Registrar ataques

1. Hacer clic en **Registro de ataques**.
2. Especificar la fecha y duración del ataque y anotar los datos relativos a ese episodio.
3. Guardar y posteriormente si así lo solicita el veterinario, el propietario podrá enviar la información del ataque por e-mail.
4. Todos los ataques registrados se guardan en el histórico y se genera un gráfico de evolución de ataques. Si lo desea puede enviar el histórico al veterinario.

NOTA: El histórico es especialmente importante para poder valorar la evolución del paciente y determinar si el tratamiento funciona adecuadamente o si requiere un ajuste en el protocolo médico. El gráfico muestra claramente la cantidad de ataques y su frecuencia, que es el mayor indicativo de la respuesta al tratamiento.

4 Añadir recordatorios

1. Hacer clic en **Recordatorio de seguimiento** si desea establecer una alarma que le recordará registrar algún ataque reciente. Podrá establecer la frecuencia de la alarma libremente.
2. Hacer clic en **Recordatorio de medicación** si desea que la App le recuerde administrar diariamente el tratamiento a la mascota.
3. Ambas alarmas permiten ajustar los horarios libremente.
4. Guardar.

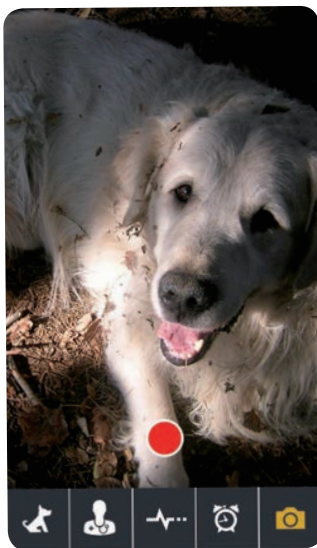

5 Hacer vídeos

1. Grabar un vídeo en el momento que sucede el ataque.
2. Enviar el vídeo al veterinario.